


小型〈全自動〉高圧蒸気滅菌装置OSクレーブ75

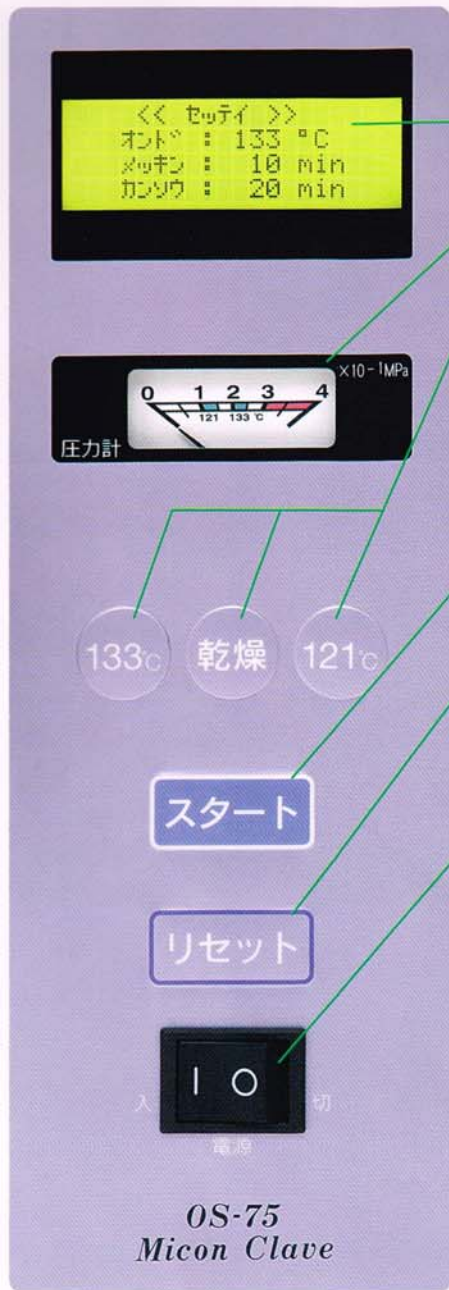

表示画面

選択された設定値、実行中の工程、異常状態の情報を液晶画面に表示します。

圧力計

チャンバー内の圧力を表示します。

設定ボタン

滅菌温度133℃、121℃および乾燥の3個のボタンがあり、それぞれ最長60分まで10分単位で時間を設定できます。

133℃滅菌ボタン 10～60分
121℃滅菌ボタン 20～60分
乾燥ボタン 0～60分

再乾燥の場合は滅菌時間を0にセットして下さい。

スタートボタン

スタートボタンを押すことにより設定されたプログラムを開始します。

リセットボタン

リセットボタンを押すことによりすべてのプログラムを中止します。また、ドアがロックされているとき、リセットボタンを押すことにより解除されます。

電源スイッチ

(入)の方向に押しますと本器に入電し、(切)の方向に押しますと電源が切れます。

【特徴】

●スタートボタンを押すだけ

プログラムを設定すれば、あとはスタートボタンを押すだけでドアの自動ロック・給水から乾燥までをフルオートで行います。

●完全な滅菌性能

簡単な操作で最長60分まで任意に設定でき、様々な滅菌物に対応できます。

●より良い乾燥性能

さらっとした乾燥が得られるよう、永年の経験を生かした自信作。

●より安全な設計

進行中の行程、残り時間が一目で分かる液晶ディスプレイ。万トラブルが発生した際にもアラームとメッセージでお知らせします。全行程で滅菌物にやさしく、滅菌には強い設計です。落雷、停電等があってもトラブル防止設計。

●特別の付帯工事一切必要ありません。

家庭用の100Vコンセントで使用できます。

●EMC適合品

法律で義務づけられている、ヨーロッパ規格、EMC規格に準拠しています。

本体から有害な電波を出しません。また、外部からの電磁波の影響を受けることなく、落雷などで過電流が本体に流れても制御基板回路は、強固に保護され破壊されません。


【仕様】

型式	OSクレーブ75
滅菌温度・時間	133℃…10分～60分 121℃…20分～60分
乾燥時間	0分～60分
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1150W
チャンバー寸法	φ241(入口寸法φ214)×D350mm
貯水タンク容量	3.2ℓ
安全装置	安全弁・液膨式サーモスタット 温度センサー・スナップサーモスタット
外径寸法	W470×D525×H342mm
総重量	28kg
医療機器承認番号	22000BZX00300000
医療機器分類	管理医療機器・クラスII 特定保守管理医療機器

付属品

歯科用 医科用

- 底板……………1枚 ……1枚
- バット……………2個 ……1個
- 棚板……………1枚 ……ナシ
- 六角レンチ……1本 ……1本
- 接地アダプタ…1個 ……1個

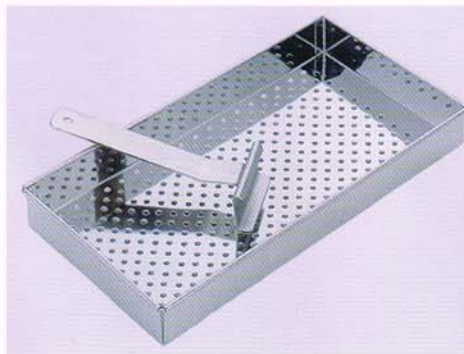

歯科用の使用例

製造販売元 株式会社 大平製作所

〒720-0074 広島県福山市北本庄1丁目8-14
TEL (084) 924-0650
FAX (084) 925-5288

【標準滅菌時間セット】

121℃	20分以上	器具類は詰め込み過ぎず、重ならないようにセットしてください。
133℃	10分以上	

被滅菌物の量が標準量を超えるときは、滅菌時間、乾燥時間とも長めに設定してください。